


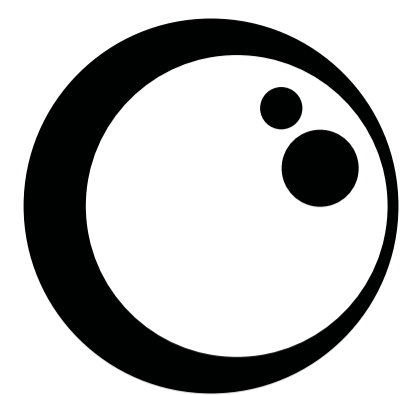

**MAXIMED**  
Latin America



**LUAMINA 4**  
INCUBADORA DE LEITURA RÁPIDA



# LUMMINA 4

## INCUBADORA DE LEITURA RÁPIDA


### DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:


Incubadora e leitora automática que promove incubação, leitura e registro de indicadores biológicos autocontidos de 3ª geração (metodologia fluorimétrica) com eficiência, segurança e agilidade. Sua configuração possibilita operar na faixa de temperatura de 60°C com tempos de incubação distintos que podem ser processados simultaneamente (20 minutos, 01 hora, 02 horas e 03 horas) e, desta maneira, processar os indicadores biológicos **"CLICKTEST MAXXIMED"** destinados a monitorar ciclos de esterilização por Vapor Saturado, por Plasma/ Vaporização de Peróxido de Hidrogênio (VH2O2) e por Vapor a Baixa Temperatura e Formaldeído (VBTF).



### COMPOSIÇÃO:

A incubadora e leitora automática **"LUMMINA 4"** possui quatro cavidades independentes e um painel totalmente intuitivo e de fácil manuseio. Com detecção automática da ampola e resultado impresso acompanhado de alarme sonoro ao término do teste, a **"LUMMINA 4"** dispõe fácil configuração de data e hora através de conexão Wi-fi.

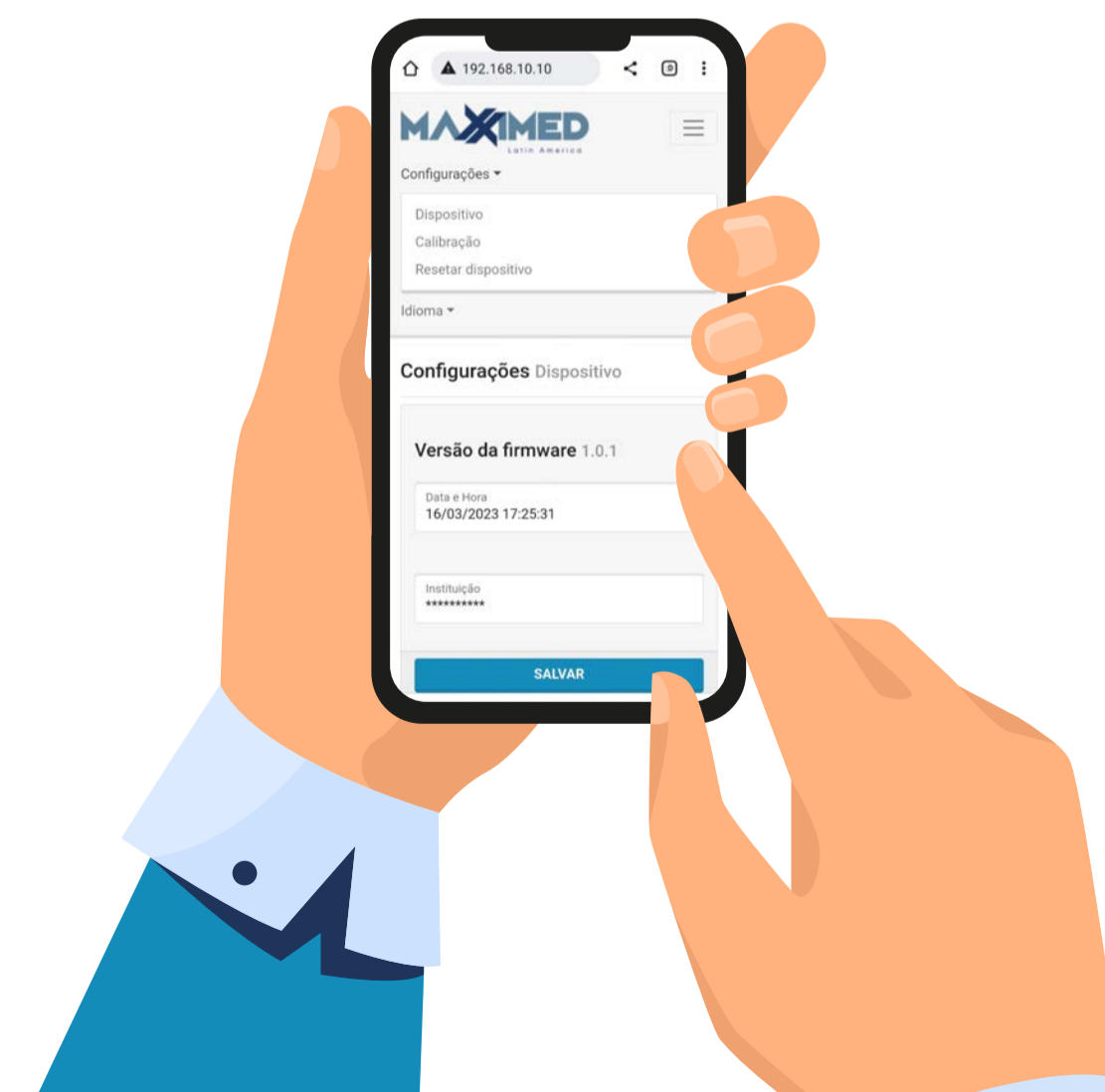

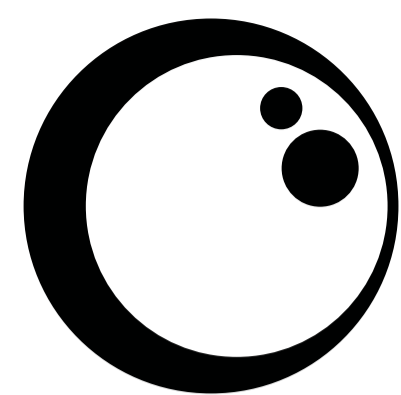


# LUMMINA 4

## INCUBADORA DE LEITURA RÁPIDA

### INSTRUÇÕES DE USO:

 **ACESSE O VÍDEO**

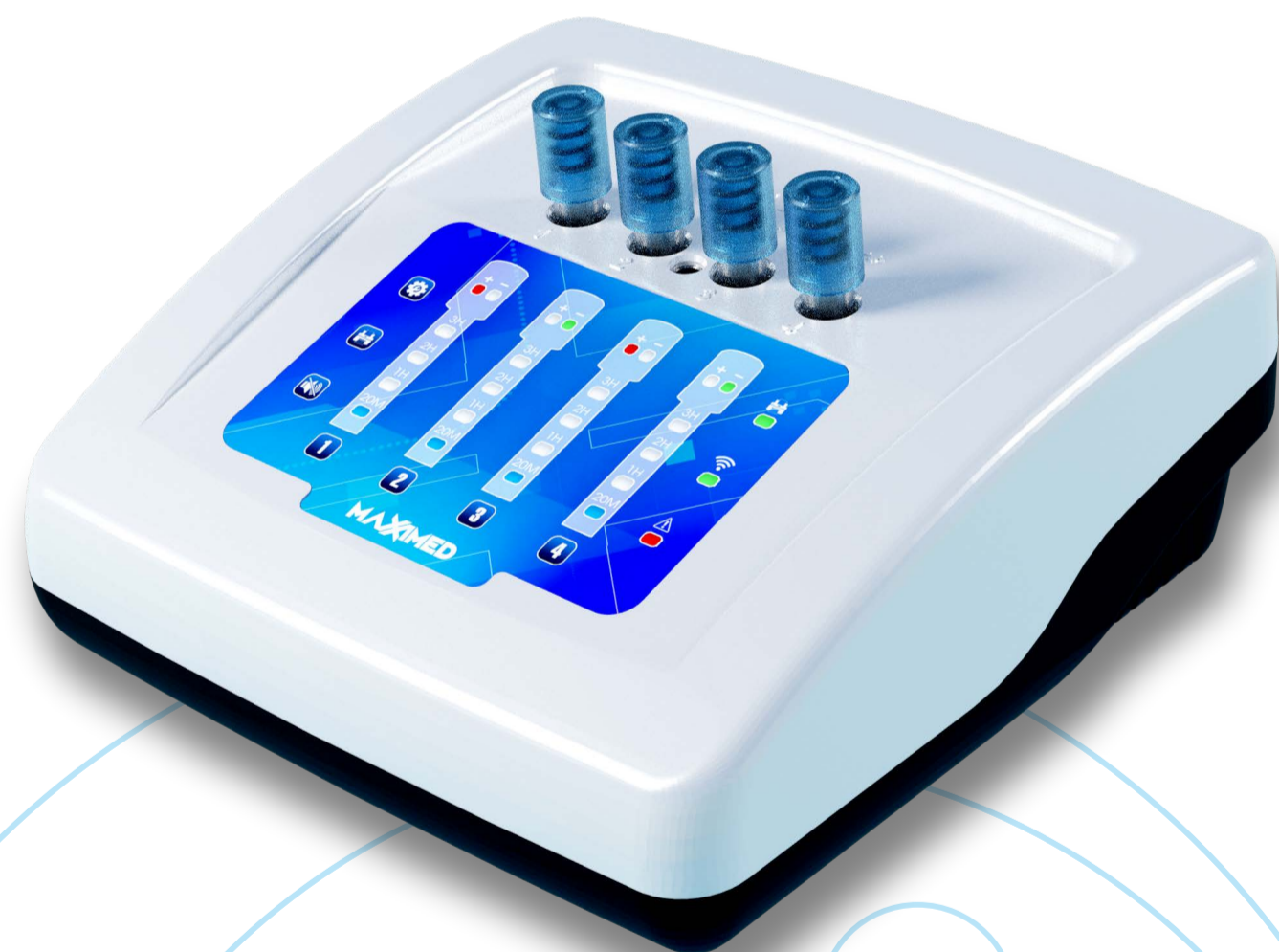

1. Selecione o tempo de incubação desejado.



2. Ative o indicador biológico **CLICKTEST** com apenas um “click” e insira-o na cavidade programada. Aguarde o término do teste.



3. Finalizada a incubação, o resultado será impresso em caracteres alfanuméricos contendo todos os dados pertinentes ao processo do teste realizado.



4. Destaque as impressões e anexe-as ao relatório do ciclo de esterilização.



# MAXIMED

[www.maxximed.com.br](http://www.maxximed.com.br)



PRODUTO  
FABRICADO NO  
BRASIL

TEMOS  
ORGULHO  
DE SER  
BRASILEIROS



**VISITE NOSSO SITE**